

LIFEWAVE®

AcuLife®

使用説明書AcuLifeを使用するために獣医や痛みの専門家である必要はありません。単にあなたの馬にパッチを適用するためのこれらの指示に従ってください、そして各配置に対するあなたの馬の反応を必ず監視してください。彼らの反応は、あなたの馬が痛みを経験している場所を理解するのに役立ちます。パッチの配置中は、馬の横に立って、決して真後ろにならないことが非常に重要です。あなたが後ろに立つと、馬があなたを蹴る可能性があります。また、AcuLifeパッチの各セットの配置を開始することをお勧めします。これは、馬は一般的にこちら側からの取り扱いに慣れているためです。

AcuLifeの推奨パッチ配置は5つあります。各配置は個別に使用できます。つまり、5つすべてのパッチ配置を同時に使用する必要はありません。



STEP 1

パッチを適用する馬の領域を見つけます。



STEP 2

プラスチックビーズをバッグから取り出します。次に、TANパッチの接着剤裏地を取り外し、プラスチックビーズをTANパッチの接着剤側の中央に置きます。



STEP 3

馬の左側の希望する場所に、ビーズ付きのTANパッチを置きます。次に、パッチをしっかりと押し下げて、それが馬に固定されていることを確認します。




STEP 4

ホワイトパッチを使用して手順2~3を繰り返し、ホワイトパッチとビーズを同じ場所に配置しますが、馬の右側に配置します。


配置#1

図に示すように、AcuLifeパッチのセットを配置します。左にタン、右にホワイト。

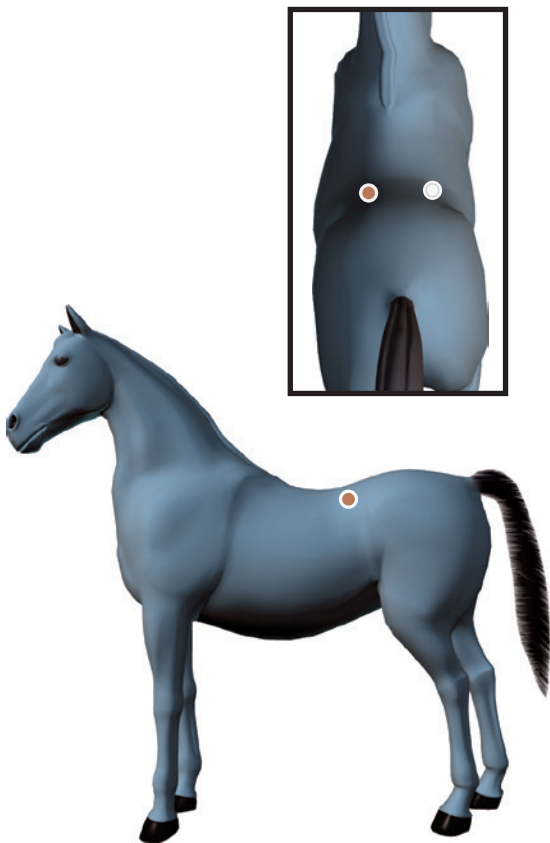

配置#2

図に示すように、AcuLifeパッチのセットを配置します。左にタン、右にホワイト。

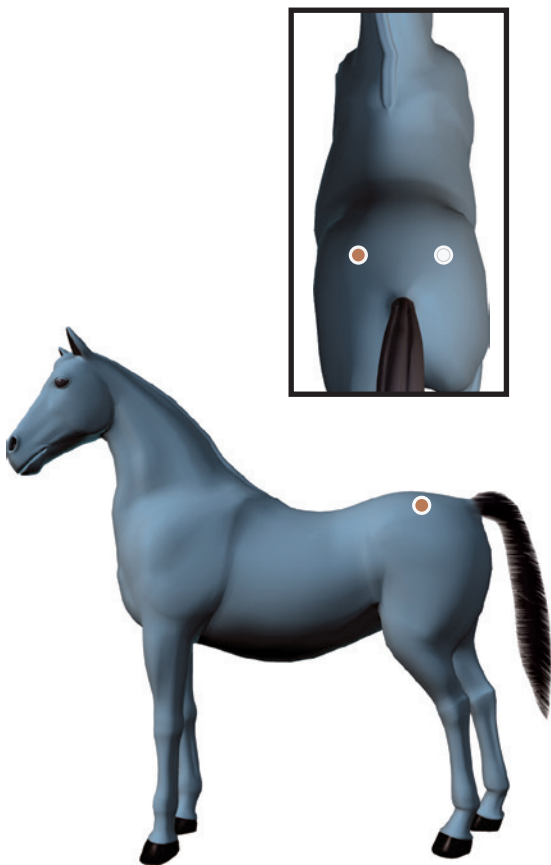


配置 # 3

図に示すように、AcuLifeパッチのセットを配置します。左にタン、右にホワイト。このパッチの配置は、関節の痛みと全体的な機能に役立ちます。この場所の圧痛は、肩、肘、膝、足首、すね、またはパステルの痛みによって引き起こされる場合があります。




配置#4

図に示すように、AcuLifeパッチのセットを配置します。左にタン、右にホワイト。

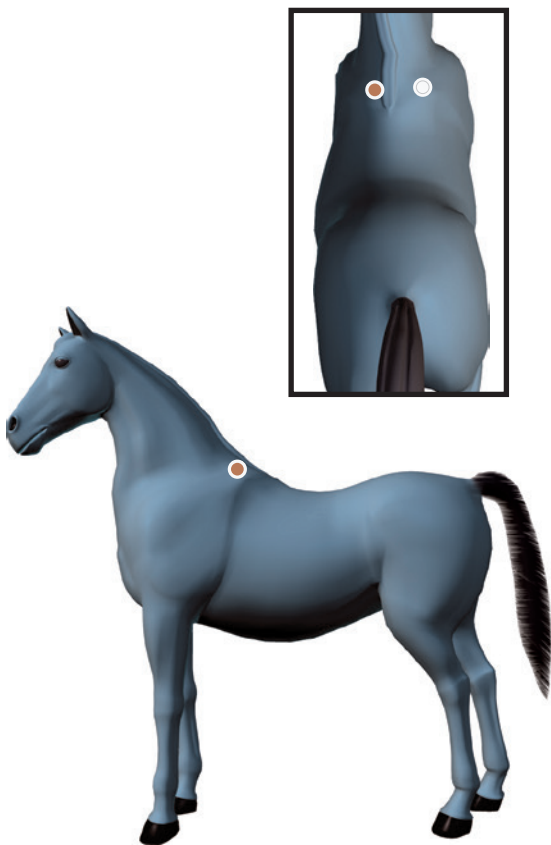

配置 # 5

図に示すように、AcuLifeパッチのセットを配置します。左にタン、右にホワイト。このパッチの配置は、一般的な身体の痛みに適しています。

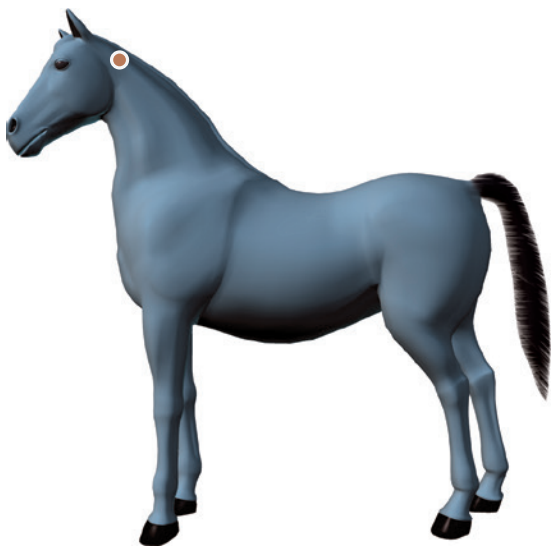

警告：馬に不快感が生じていると感じた場合は、すぐに取り外してください。スキンから削除されたパッチを再利用しないでください。外用のみ。開いた傷や損傷した皮膚には使用しないでください。馬が妊娠している疑いがある場合は使用しないでください。馬の健康状態が疑われる場合は、獣医に相談してください。この製品を子供の手の届かないところに保管してください。